
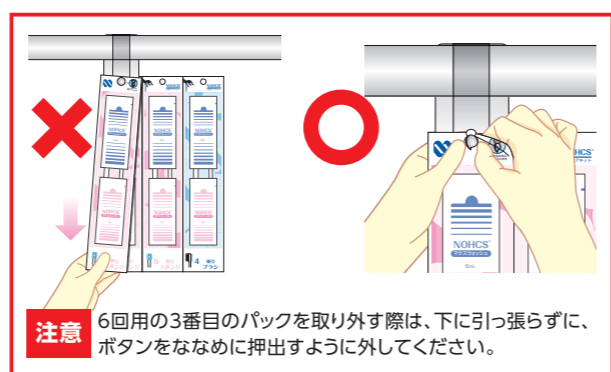
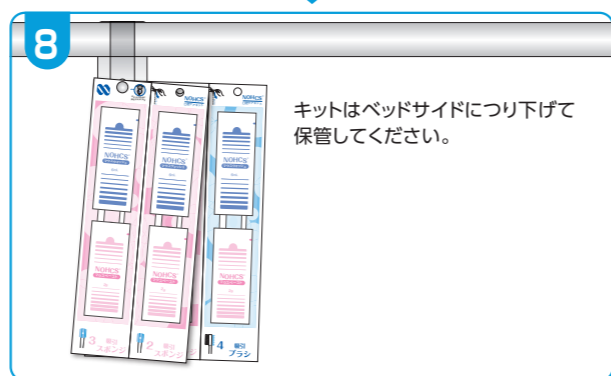
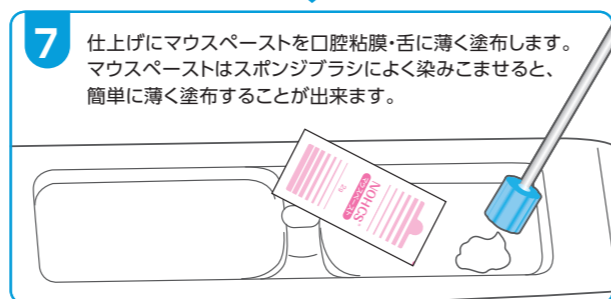
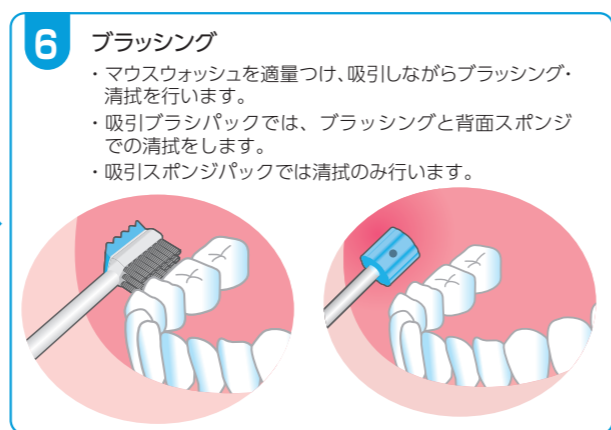
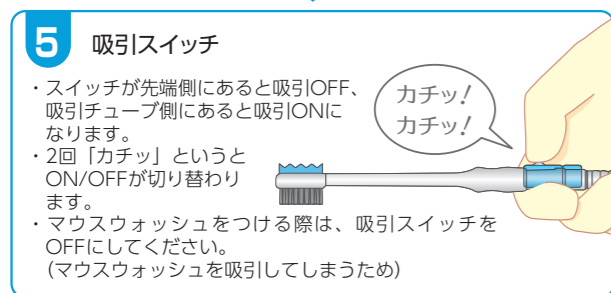
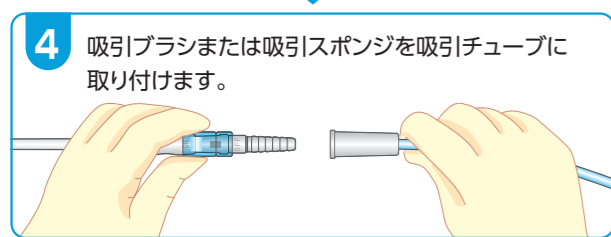
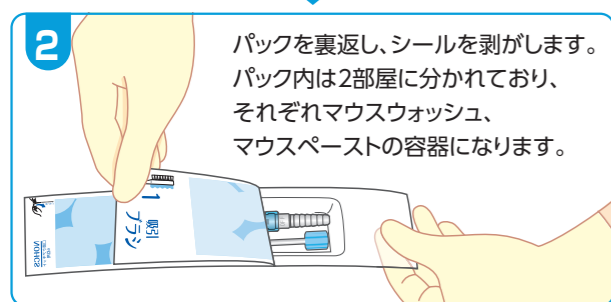


使用方法

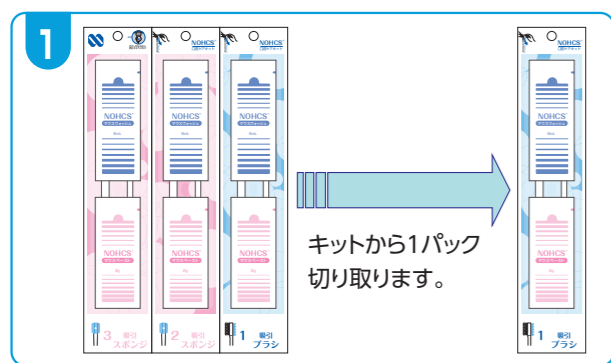

規格

商品コード	品名・規格	梱包	JANコード
21-800	NOHCS 口腔ケアキット 3回用	20キット/箱	4987458218002
21-801	NOHCS 口腔ケアキット 6回用	10キット/箱	4987458218019
21-804	NOHCS 口腔ケアキット 1回用 (吸引ブラシ)	60キット/箱	4987458218040
21-805	NOHCS 口腔ケアキット 1回用 (吸引スポンジ)	60キット/箱	4987458218057

※本製品は医療器械・医療用医薬品には該当致しません。マウスウォッシュ・マウスペーストは医薬部外品です。

NOHCS®

口腔ケアキット

3回用

6回用



口腔ケアを簡単で安全にします。

NOHCS[®] 口腔ケアキットは、吸引・清拭・殺菌を組み合わせで口腔内を水で洗浄しない口腔ケアを実施するためのキットです。

特長

口腔ケアの省力化・統一化に貢献

- ケア用品が1回分ずつパックになっているため、準備の時間を短縮します。
- ケア用品が単回使用になるため、片付けの手間がかかりません。
- ケア用品が統一化されるため、ケア方法の統一化につながります。
- パックの消費でケアの回数を確認できるので、ケアのし忘れを防止します。



吸引ブラシ 吸引スポンジ スポンジブラシ

誤嚥しにくい口腔ケア

- 吸引ブラシ・吸引スポンジを吸引チューブに接続することで、1本で吸引とブラッシング・清拭が可能です。
- 1本でブラッシング・清拭と吸引が同時にできるため、口腔内の視野確保を手助けします。
- 吸引と清拭により、口腔内を水で洗浄せずに、汚染物を回収します。
- ケア用品は単回使用のため衛生的です。

マウスウォッシュ・マウスペーストには殺菌成分を配合

- マウスウォッシュ・マウスペーストには薬用成分塩化セチルピリジニウムが配合されており、口腔内の細菌を殺菌し、口臭や歯周炎を予防します。
- マウスウォッシュは吸引ブラシ・吸引スポンジと併用し、殺菌しながら口腔内の汚染物を回収します。
- マウスペーストには湿潤剤が配合されています。スポンジブラシに良く染みこませ、口腔ケアの仕上げに舌・口腔粘膜へ使用します。



マウスウォッシュ
製造販売：株式会社アイテック

マウスペースト
製造販売：ミリオナ化粧品

成分

マウスウォッシュ(医薬部外品)
塩化セチルピリジニウム(有効成分)、精製水(溶剤)、ソルビトール液(湿潤剤)、キシリット(甘味剤)、PG(溶剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、POE硬化ヒマシ油(可溶剤)、メチルパラベン(防腐剤)、L-メントール(香味剤)

マウスペースト(医薬部外品)
精製水(基剤)、BG(湿潤剤)、ヤシ油(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、カルボキシメチルセルロースナトリウム(粘結剤)、ヒアルロン酸Na-2(湿潤剤)、コラーゲン水解末(湿潤剤)、セチルピリジニウムクロリド(薬用成分)、オリーブ油(湿潤剤)、天然ビタミンE(安定剤)、POE水添ヒマシ油(可溶剤)、ステアリン酸POEソルビタン(可溶剤)、無水クエン酸(pH調整剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、水酸化K(pH調整剤)、カルボキシビニルポリマー(粘結剤)、安息香酸Na(保存剤)、プロピルパラベン(保存剤)、香料(着香料)


構成

● 構成部品



①吸引ブラシ ②吸引スポンジ ③スポンジブラシ ④マウスウォッシュ ⑤マウスペースト

	キットの構成	パック内の構成				
3回用 3回/日 (8時間ごと)		1	①吸引ブラシ	③ スポンジブラシ	④ マウスウォッシュ	⑤ マウスペースト
		2	②吸引スポンジ			
		3	①吸引ブラシ			
6回用 6回/日 (4時間ごと)		1	①吸引ブラシ	③ スポンジブラシ	④ マウスウォッシュ	⑤ マウスペースト
		2	②吸引スポンジ			
		3	①吸引ブラシ			
1回用 吸引ブラシ		①吸引ブラシ	③スポンジブラシ	④マウスウォッシュ	⑤マウスペースト	
		②吸引スポンジ	③スポンジブラシ	④マウスウォッシュ	⑤マウスペースト	

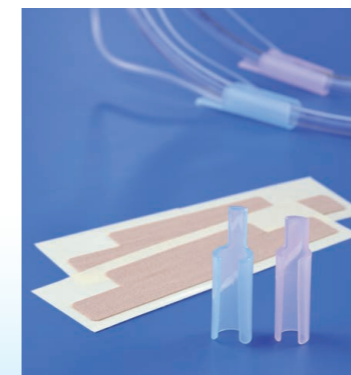

製造販売：ニプロ株式会社

関連製品 ニプロバイトブロック B-BOC[®] (ビーブロック)

気管内チューブへはめ込む外挿タイプのバイトブロックです。

商品コード	品名・規格	構成品(未滅菌)	梱包	JANコード
51-878	バイトブロック(B-BOC) セット	バイトブロック1個、固定テープ2枚	20セット	4987458518782
51-879	バイトブロック(B-BOC) 固定テープ	固定テープのみ	400枚	4987458518799
51-880	バイトブロック(B-BOC) 単体	バイトブロックのみ	100個	4987458518805
51-876	バイトブロック(B-BOC) (L) セット	バイトブロック(L)1個、固定テープ2枚	20セット	4987458518768
51-877	バイトブロック(B-BOC) (L) 単体	バイトブロック(L)のみ	100個	4987458518775

販売名：ニプロバイトブロック 一般的名称：短期的使用口腔咽頭エアウェイ
医療機器届出番号：27B1X00045000079 クラス分類：クラスI (一般医療機器)